

ACQ425 / 500 ml Göz Solüsyonu

Toz, kir, metal ve ahşap parçacıkları gibi küçük ve görülmez olan ve vücuda zarar veren bu tür işlemler için yapışmasını engelleme amaçlı kullanılmaktadır.

CE0123



● Teknik Özellikler

İçerik	Sterile Sodium Chloride 0,9%
Renk	Renksiz, şeffaf, transparan
Form	Sıvı
Koku	Kokusuz
Koli Miktarı	10 Adet

B | BRAUN

Made in GERMANY

STARLINE

KULLANIM ŞEKLİ



Göz duşu kapağı üzerinde bulunan ok işareti şekli yönünde çevrilir, kapak baş ve işaret parmağı ile sıkılır, göz duşu kapağı bu pozisyonda iken göz yuvasına yaslanır ve parmaklar serbest bırakılır, bu sayede göz kapakları göz duşu uygulanırken açık kalmasına yardımcı olacaktır, kafamızı yere eyerek göz duşu şişesini hafif sıkacağız ve solüsyonun gözümüzle temasını başlatırız, fazla sıvı şişe kapağındaki tahliye deliklerinden aşağı akacaktır, kalan göz solüsyonu şişe ters çevrilerek ve sıkılarak göze uygulanır, her bir göz duşu şişesi bir ilkyardıma kapsar, daha sonra tekrar kullanılmaz. Göz duşları tek kullanımlıktır.

Önemli! Tüm hasar türlerinde göz yıkama sıvısı göze yumuşak ve eşit bir şekilde uygulanmalıdır. Şişeye sıkmadan hafifçe basın. Her zaman bir doktora başvurun ve yıkamaya nakil sırasında da devam edin.

Gerekli Uygulamalar

500ml olan göz sıvıları 15dk gibi bir süre içerisinde uygulanmaktadır. Her bir göz sıvısı tek kullanımlıktır. Tekrar tekrar kullanımı uygun değildir. Açıldıktan itibaren kullanılması mecburidir.

Saklama Şekli

Açılmamış orjinal ambalajında, 5-25 °C sıcaklık aralıklarında ve kuru ortamda hasar almayacak şekilde saklayınız. Malzemenin hasar görmemesi için ürünü güneş ışığı ve UV ışınlarından koruyunuz.


Kullanım Alanları



Tarım



İnşaat

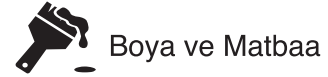

Boya ve Matbaa



Otomotiv



Temizlik

Yabancı maddelerin dışarı atılmasında, toz, kir, metal ve ahşap parçacıkları gibi küçük ve görülmez olan ve vücuda zarar veren bu tür işlemler için yapışmasını engelleme amaçlı kullanılmaktadır.

STARLINE

İSTASYONLAR

Grup halinde satılan iki adet göz duşu istasyon içeriklerimiz aşağıda belirtilmiştir.



CPS023 - Göz Duşu İstasyonu
(2Ad. ACQ425 + 1Ad. Ayna)

Montaj Malzemeleri
1 Ad Duvar Panosu
1 Ad Pano Üzerine Monte Ayna
1 Set Montaj Malzemesi [Dübel-Vida]



CPS024 - Göz Duşu İstasyonu
(1Ad. ACQ425 + 1Ad. ACQ426 + 1Ad. Ayna)

Sipariş Bilgisi

MODEL	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Kg Koli Ağırlığı
CPS023 G.D. İstasyonu	8680907926829	1 Adet	33 x 43 x 9cm	1.80kg.
CPS024 G.D. İstasyonu	8680907926775	1 Adet	33 x 14 x 9cm	1.60kg.
ACQ425 / 500ml	8680907926744	10 Adet	14 x 33 x 28cm	6.20kg.
ACQ426 / 250ml	8680907926768	10 Adet	14 x 32 x 21cm	3.40kg.